

Unterweisungsnachweis

Anwendung der FFP2 Maske

Produktbezeichnung *die verwendet wird!*

Name des/der Unterweisenden

Anlass der Unterweisung:

Abteilung/Team:

Ort der Unterweisung:

Datum, Uhrzeit:

A. Bereitstellung und Gebrauchsanleitung

- Bereitstellung (durch)
und Durchsprache der Gebrauchsanleitung des oben bezeichneten Produktes.
(siehe Anlage Gebrauchsanleitung)

B. Tragedauer (allgemein)

- Tragedauer entsprechend der Herstellerangabe;
- Ggf. entsprechend der allgemeinen Empfehlung;
- In der Regel bei leichter körpl. Arbeit max. 120 min bei konstanter Tragezeit;
- Tragedauer gesamt max 8 Std (Arbeitsschicht);
- Unterbrechung der Tragezeit nach mind. 120 min für ca. 20 – 30 min.

C. Allgemeine Hinweise

- Auch mit Maske sollte der vom RKI empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m zu anderen Menschen eingehalten werden;
- Die Maske muss gut passen und über Mund, Nase und Wangen sitzen. Die Ränder der Maske sollen eng anliegen und keine Luftströme an der Maske vorbei erlauben. Eine FFP-Maske kann ihre volle Filterleistung nur dann erbringen, wenn sie dicht sitzt;
- Bei der ersten Verwendung soll getestet werden, ob die Maske genügend Luft durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern;
- Eine durchfeuchtete Maske soll abgenommen und gewechselt werden;
- Beim Aufsetzen und beim Abnehmen der Maske soll diese möglichst immer an den Bändern der Maske angefasst werden;
- Vor dem Aufsetzen und nach dem Absetzen der Maske sind die Hände unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln gründlich zu waschen (mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife);
- Wenn die Masken vom Hersteller als Einwegprodukte vorgesehen sind – siehe Gebrauchsanleitung - sind diese regelmäßig zu wechseln und nach Verwendung zu entsorgen.

